


Kartuschenwechsel



Vorderabnahme der unteren Abdeckung muss diese komplett geschlossen sein.

Tipp: Um dieses sicher zu stellen, drücken Sie das untere Cover auf einen festen Untergrund.

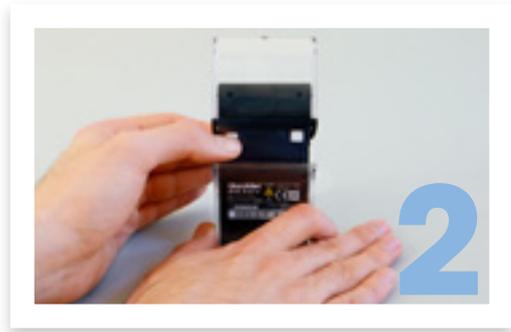

Belassen Sie den GlucoMen® READY auf dem festen Untergrund, drehen ihn um und schieben Sie die obere Abdeckung nach oben. Schieben Sie dann den linken Hebel (weißer Knopf, Pfeil zeigt auf unteres Cover) bis zum Anschlag nach unten (leichtes Klicken ist zu hören) und ziehen den GlucoMen® READY aus dem Cover heraus.



Öffnen Sie das Kartuschenfach, indem Sie es nach links schieben und dann nach unten öffnen.



Legen Sie die neue Kartusche in Pfeilrichtung ein und schließen Sie das Kartuschenfach wieder.



Schieben Sie die untere Abdeckung wieder auf den GlucoMen® READY.

Tipp: Legen Sie den GlucoMen® READY dazu am Besten auf einen flachen Untergrund.