



# Lanzettenwechsel

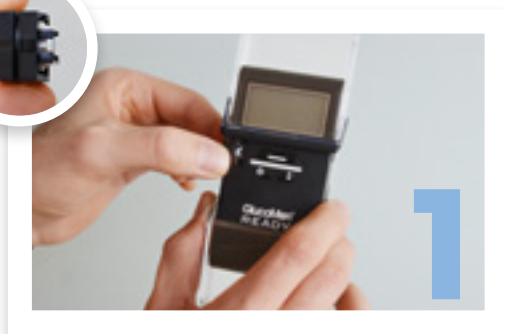


**Entfernen der Lanzettenhalterung**  
Ziehen Sie die Lanzettenhalterung links aus dem GlucoMen® READY im Ganzen heraus.



**Einsetzen der Lanzette (Siehe Tipp)**  
Halten Sie die Lanzette am breiten, flachen Ende und schieben Sie den langen Schaft so weit wie möglich von hinten in die Stechhilfe. Lassen Sie dabei die Schutzkappe auf der Lanzette.

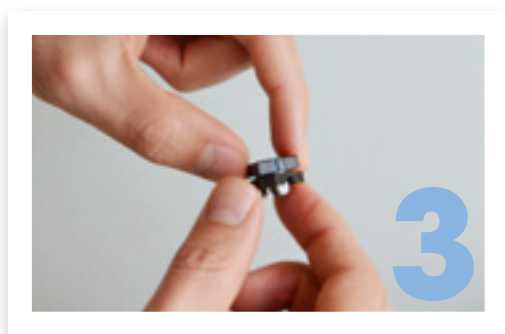

**Einstellen der Stechtiefe**  
Die Einstichtiefe regulieren Sie, indem Sie den äußeren Teil der Stechhilfe gegen den inneren Teil drehen. Die Tiefe wird durch die Striche am äußeren Teil der Stechhilfe angezeigt. Der Halbkreis dient als Einstellungspunkt. (Mindesttiefe I bis Höchsttiefe IIII)

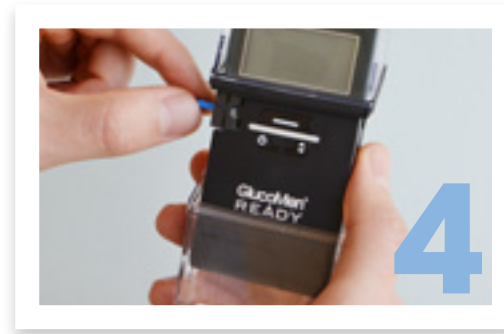

**Aufsetzen der Stechhilfe**  
Setzen Sie die Stechhilfe wieder in den GlucoMen® READY ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Halbkreis in die zugehörige Aussparung gesetzt wird. (Halbmond zu Halbmond)



Entfernen Sie durch drehen die Lanzettenkappe. Dann schließen Sie das untere Cover wieder.



**Tipp:** Am Besten entfernen Sie die gebrauchte Lanzette, indem Sie sie mit der Schutzkappe der neuen Lanzette herausdrücken.