


# Blutzuckermessung

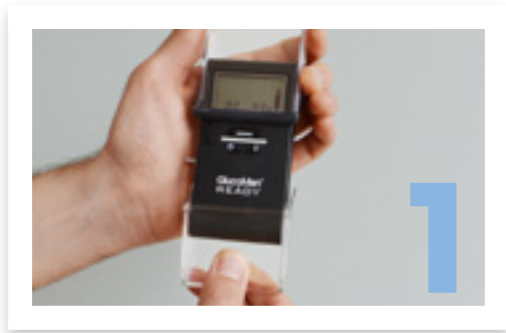


## Lanzette und Teststreifen laden

Die obere Abdeckung nach oben ziehen. Die untere Abdeckung so weit wie möglich nach unten ziehen, bis ein Klick zu hören ist. (Lanzette und Teststreifen sind geladen)



## Stechhilfe auslösen

Den Finger gegen die Lanzettenhalterung drücken und Lanzette mit der  -Taste auslösen. Sie können die Stechhilfe so oft spannen, wie Sie möchten.



## Blut auftragen

Den Blutstropfen auf die Spitze des Teststreifens auftragen. Die Messung beginnt automatisch.



Das Ergebnis wird nach 5 Sekunden angezeigt.

**Info:** Die Displaybeleuchtung wird nach der Messung beim Erscheinen des Messergebnisses im Dunkeln aktiviert.



Den Teststreifen aus dem Gerät entfernen.



Das Cover schließen.