



Kartuschenwechsel

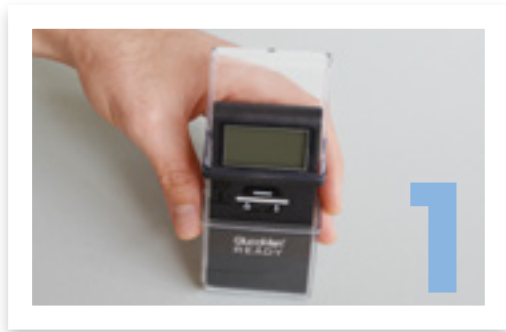

Vorderabnahme der unteren Abdeckung muss diese komplett geschlossen sein.

Tipp: Um dieses sicher zu stellen, drücken Sie das untere Cover auf einen festen Untergrund.

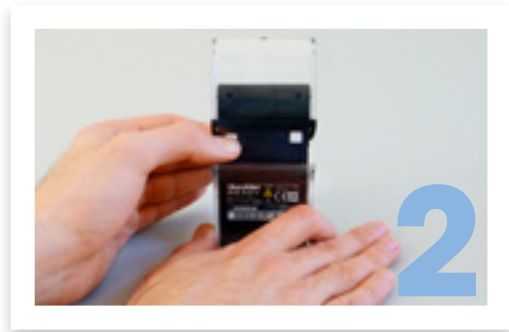

Belassen Sie den GlucoMen® READY auf dem festen Untergrund, drehen ihn um und schieben Sie die obere Abdeckung nach oben. Schieben Sie dann den linken Hebel (weißer Knopf, Pfeil zeigt auf unteres Cover) bis zum Anschlag nach unten (leichtes Klicken ist zu hören) und ziehen den GlucoMen® READY aus dem Cover heraus.



Öffnen Sie das Kartuschenfach, indem Sie es nach links schieben und dann nach unten öffnen.




Legen Sie die neue Kartusche in Pfeilrichtung ein und schließen Sie das Kartuschenfach wieder.



Schieben Sie die untere Abdeckung wieder auf den GlucoMen® READY.

Tipp: Legen Sie den GlucoMen® READY dazu am Besten auf einen flachen Untergrund.


Lanzettenwechsel

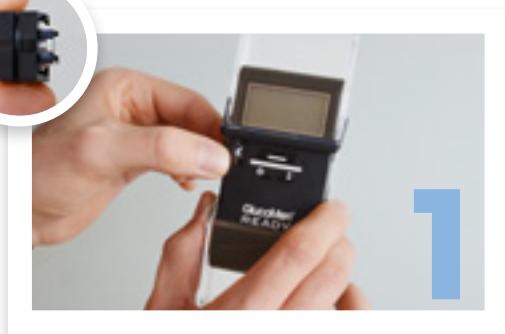


Entfernen der Lanzettenhalterung
Ziehen Sie die Lanzettenhalterung links aus dem GlucoMen® READY im Ganzen heraus.




Einsetzen der Lanzette (Siehe Tipp)
Halten Sie die Lanzette am breiten, flachen Ende und schieben Sie den langen Schaft so weit wie möglich von hinten in die Stechhilfe. Lassen Sie dabei die Schutzkappe auf der Lanzette.

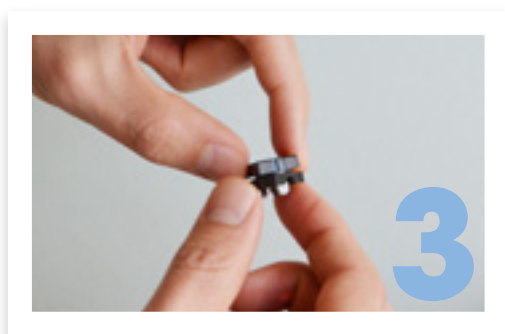

Einstellen der Stechtiefe
Die Einstichtiefe regulieren Sie, indem Sie den äußeren Teil der Stechhilfe gegen den inneren Teil drehen. Die Tiefe wird durch die Striche am äußeren Teil der Stechhilfe angezeigt. Der Halbkreis dient als Einstellungspunkt. (Mindesttiefe I bis Höchsttiefe IIII)

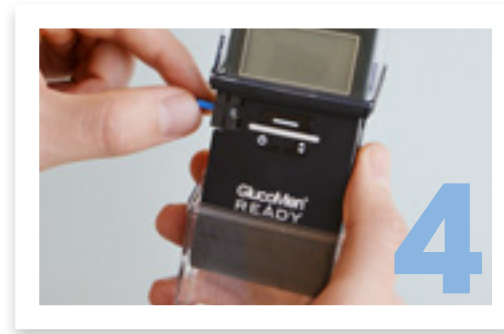

Aufsetzen der Stechhilfe
Setzen Sie die Stechhilfe wieder in den GlucoMen® READY ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Halbkreis in die zugehörige Aussparung gesetzt wird. (Halbmond zu Halbmond)

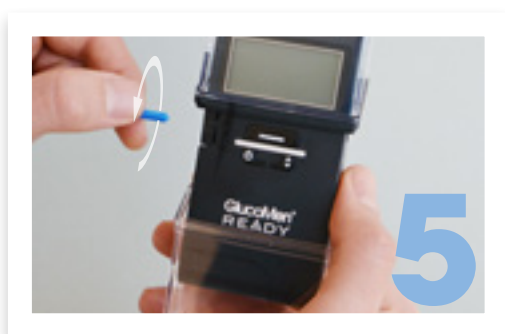


Entfernen Sie durch drehen die Lanzettenkappe. Dann schließen Sie das untere Cover wieder.



Tipp: Am Besten entfernen Sie die gebrauchte Lanzette, indem Sie sie mit der Schutzkappe der neuen Lanzette herausdrücken.

Blutzuckermessung

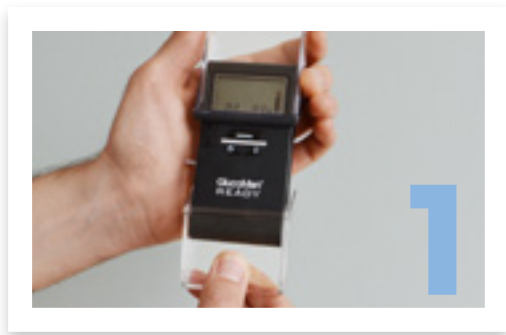


Lanzette und Teststreifen laden

Die obere Abdeckung nach oben ziehen. Die untere Abdeckung so weit wie möglich nach unten ziehen, bis ein Klick zu hören ist. (Lanzette und Teststreifen sind geladen)



Stechhilfe auslösen

Den Finger gegen die Lanzettenhalterung drücken und Lanzette mit der  -Taste auslösen. Sie können die Stechhilfe so oft spannen, wie Sie möchten.



Blut auftragen

Den Blutstropfen auf die Spitze des Teststreifens auftragen. Die Messung beginnt automatisch.



Das Ergebnis wird nach 5 Sekunden angezeigt.

Info: Die Displaybeleuchtung wird nach der Messung beim Erscheinen des Messergebnisses im Dunkeln aktiviert.



Den Teststreifen aus dem Gerät entfernen.



Das Cover schließen.

READY TO GO

Immer dabei, diskret und sicher.
Unbeschwert Blutzucker messen!

GlucoMen® READY

Jetzt testen: glucomenready.de



Kompakt, mit Teststreifen
und Stechhilfe



25 Teststreifen in
einer Kartusche



Blutzuckermessung
in 5 Sekunden



Gerätetasche ade – Cover
für Schutz und Funktion



 Division der
BERLIN-CHEMIE

Kunden-Service Diabetes: Telefon (kostenlos) 0800 - 45826636
www.glucomenready.de | glucomen@berlin-chemie.de

GlucoMen® READY

So misst man heute.